

Телефон: +7 (495) 955-92-11, +7 (499) 390-53-76

E-mail: info@tdsing.ru


Сайт: tdsing.ru

г. Москва



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЕЗМАТЫ

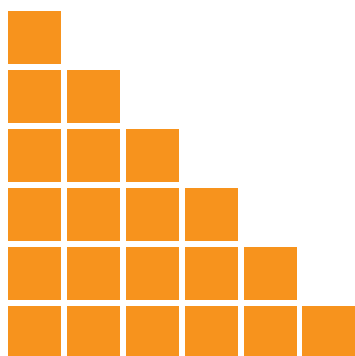

Продукция серии «ЭКО» изготовлена по ТУ 22 9259-001-0145002379-09

- Уложить дезмат в местах прохода животных на чистую ровную поверхность. В случае отсутствия подготовленной площадки необходимо использовать настил из досок.
- Приготовить дезинфицирующий раствор, соблюдая меры личной гигиены, избегая попадания раствора на кожные покровы и в глаза.
- Залить готовый раствор в дезмат из расчета 25-30 литров на 1 кв.м. (50-60 литров раствора для дезмата 100*200*6 см)

Для лечебных целей в ветеринарии при поражении копытец и межпальцевого свода крс используют 5% растворы меди, цинка сульфата или их сочетание. С целью профилактики межпальцевого, пальцевого дерматита крс используют 2% растворы «педилайна», меди, цинка сульфата подливая раствор по мере расхода. Частота обработки определяется ветеринарным врачом. С целью профилактики рекомендуем использовать дезматы не менее 7 дней в месяц. При перерывах в обработке конечностей дезмат перевернуть лицевой частью вниз для свободного стока дезраствора, затем, перевернув дезмат, залить его чистой водой и повторив процедуру очистки убрать с места прохода животных.

Срок эксплуатации дезмата «Эко-МАСТ» толщиной 6 см при условии ежедневного прохода 1500 коров - не менее 2 месяцев. Дезмат не теряет своих свойств после 90 тысяч проходов КРС.